

Bodometer MZ10017

Svinovací metr

Návod k použití

Obsah balení:

Páskové měřidlo

Fixační materiál (3 šroubky, 3 hmoždinky)

Montáž:

Pro nalezení správného místa pro upevnění postavte měřidlo na podlahu ke stěně.

Vytáhněte posuvnou část měřidla tak, aby ryska uprostřed okénka byla na "0".

Měřidlo připevněte na stěnu pomocí hmoždinek a šroubků a zkontrolujte správnost umístění.

Utáhněte řádně šroubky a ujistěte se, že je držák měřidla je řádně připevněn.

Měření:

Pacienta, který má být změřen, postavte pod měřidlo zády ke stěně.

Dbejte na to, aby se paty pacienta se dotýkaly stěny a jeho hlava byla vzpřímená.

Stáhněte posuvnou část měřidla k hlavě pacienta.

Číslice, která je na rysce v okénku, je výška pacienta.

Vraťte posuvnou část měřidla do výchozí polohy.

Čištění:

Plastové části měřidla čistěte v případě potřeby hadříkem navlhčeným vodou s jemným mýdlem, otřete hadříkem navlhčeným vodou a dobře osušte.

K čištění nepoužívejte chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.

Záruka:

Záruka na přístroj je 2 roky od data koupě. K uplatnění záruky je nutno předložit doklad o zakoupení přístroje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení vzniklé používáním, závady vzniklé nešetrným zacházením nebo přírodními katastrofami nebo používáním k jiným účelům než je popsáno v tomto návodu. Záruka propadá při neoprávněném otevření výrobku.

Technická data:

Rozsah měření: 0 - 2200 mm

Přesnost: 1 mm

Rozměry: 140 x 130 x 35 mm

Hmotnost: cca 180 g