

Uživatelský manuál pro výškoměr Seca 206.



Gratulujeme

Pořízením výškoměru Seca 206 jste zakoupili snadno ovladatelný přístroj pro měření výšky dětí i dospělých. Je určen pro použití v nemocnicích, lékařských ordinacích a lůžkových měřicích a ošetrovatelských zařízeních.

Bezpečnost

Před použitím nového výškoměru prosím věnujte dostatečný čas k přečtení následujících bezpečnostních pokynů.

- Postupujte podle návodu k obsluze.
- Použijte dodaný montážní materiál.
- Po měření zasuňte výškoměr zpět nahoru, aby nehrozilo nebezpečí zranění.

Přípevnění výškoměru na zeď

1. Umístěte výškoměr na podlahu ke zdi.
2. Vytáhněte metr dostatečně daleko, aby se nula přesně shodovala s červeným pruhem v oblasti odečítání. Poté označte místo vyvrtání na stěně v horní části přípevňovacího otvoru.
3. Připevněte konec metru na stěnu pomocí dodaného šroubu.
4. Zatlačte výškoměr zpět.

Měření výškoměrem

- a. Osoba, která má být měřena, stojí pod výškoměrem.
- b. Měřicí jazýček je spuštěn k hlavě měřené osoby.
- c. Výška se objeví v oblasti odečítání. Při dodržení výše uvedených kroků je přesnost měření ± 5 mm.

Čištění

Vyčistěte měřicí tyč podle potřeby pomocí domácího čisticího prostředku nebo komerčně dostupných dezinfekčních prostředků. Postupujte podle pokynů výrobce.

Technická data

Rozsah měření: 0 - 220 cm

Dělení: 1 mm / 1/8 palce

Rozměry (Š x V x H): 35 x 115 x 150 mm

Hmotnost: cca 140 g

Zdravotnický přípravek dle Směrnice 93/42/EHS: Třída I

Likvidace

Pokud již není možné měřicí zařízení používat, váš odpovědný orgán pro likvidaci odpadu vám rád poskytne informace o opatřeních nezbytných pro jeho řádnou likvidaci.

Záruka

Na vady způsobené špatným materiálem nebo zpracováním ručíme 24 měsíců od data nákupu. Záruka pozbývá platnosti, pokud je zařízení instalováno neoprávněnými osobami.

Důležité: záruka platí pouze ve spojení s dokladem o koupi.

Dovozce:

KALIST AKL s.r.o.

Třebětice 8

769 01 Holešov

Česká republika

